



Zing



PORTATIF ET LEGER

- 3 pieds pliables, une poignée de transport et un poids inférieur à 9 kg rendent le Zing Portatif facile à déplacer.
- Avec un faible encombrement une fois plié, il est désormais possible de voyager avec votre appareil modulaire de verticalisation Zing. Lorsqu'une séance de verticalisation est terminée, le Zing Portatif peut être rangé sans prendre beaucoup de place. Idéal pour la maison, en institution ou à l'école.
- Ce dispositif élargit les possibilités thérapeutiques en donnant de nouvelles perspectives aux prises en charge de l'enfant pour l'intervention précoce / le statut pédiatrique.

LARGE PLAGE DE RÉGLAGE

- Convient aux enfants en bas âge jusqu'à 91 cm pour 16 kg.
- La verticalisation peut commencer dès le plus jeune âge car il n'y a aucune exigence de taille ou de poids minimum.
- L'installation presque à l'horizontale rend les transferts plus faciles à gérer au cours de la croissance de l'enfant.

VRAIE ABDUCTION

- Les points de pivot sont alignés sur les hanches, favorisant un bon alignement entre les hanches, les genoux et les pieds.
- Les pieds maintiennent la position avec la jambe. Aucune cale ou ajustement est nécessaire au niveau des genoux et des repose-pieds.
- Jusqu'à 15 ° d'abduction par jambe - grâce à une seule molette.
- Favorise le développement musculo-squelettique des enfants à une période essentielle.
- L'abduction peut être ajustée sur une plage sans fin.



RÉGLAGE FACILE

- Sangles intégrées dans la sellerie.
- Tous les composants sont réglables sans outils.
- Chaque réglage peut être effectué en tournant simplement une molette.

TABLETTES MULTI-USAGES

- La position dorsale dispose d'une tablette multi-usage qui pivote dans les deux sens.
- La position ventrale comporte une tablette réglable en angle.
- La tablette peut rester attaché pendant les transferts.
- Plus d'activités sont possibles en escamotant la tablette pendant la thérapie de verticalisation sur le dos.

NOUVELLE NORME DE SOINS

Le démarrage précoce d'un programme de verticalisation (environ 9 à 14 mois, avec ses pairs) est une approche qui tend à se généraliser. La prévalence croissante des programmes de surveillance de la hanche fournit des preuves qu'il existe un potentiel d'amélioration des résultats (réduction de la migration, de la subluxation et de la dislocation de la hanche et prévention de futures interventions chirurgicales) lorsqu'un programme complet est mis en œuvre et inclut la verticalisation dans la prise en charge.



La position debout en abduction est recommandée dans plusieurs programmes de surveillance de la hanche à grande échelle. Certains kinésithérapeutes spécialisés dans l'intervention précoce préconisent également des approches fondées sur des données probantes qui incluent la position debout en abduction comme approche préventive du développement de la hanche ou de l'acétabule avant un diagnostic d'intégrité de la hanche.

Les recherches sur la position assise prolongée parmi la population valide présentent des impacts négatifs évidents sur le corps et la santé globale. Les personnes souffrant de troubles du développement musculo-squelettique ou de problèmes neurologiques devraient également se tenir debout dans la plupart des cas.

FONCTIONNALITÉS



1. POIGNÉE DE TRANSPORT
2. MÉCANISME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ
3. PIEDS PLIABLES
4. REPOSE PIEDS MULTI-RÉGLABLE
5. GENOUILLÈRES MULTI-RÉGLABLE
6. ABDUCTION DES JAMBES DE 15° SUR CHAQUE JAMBE
7. SANGLES DE SOUTIEN INTÉGRÉES
8. TABLETTE PIVOTANT MULTI-RÉGLABLE
9. APPUI-TÊTE
10. TRANSFERTS QUASI ALLONGÉ
11. CHANGEMENT DE POSITION FACILE

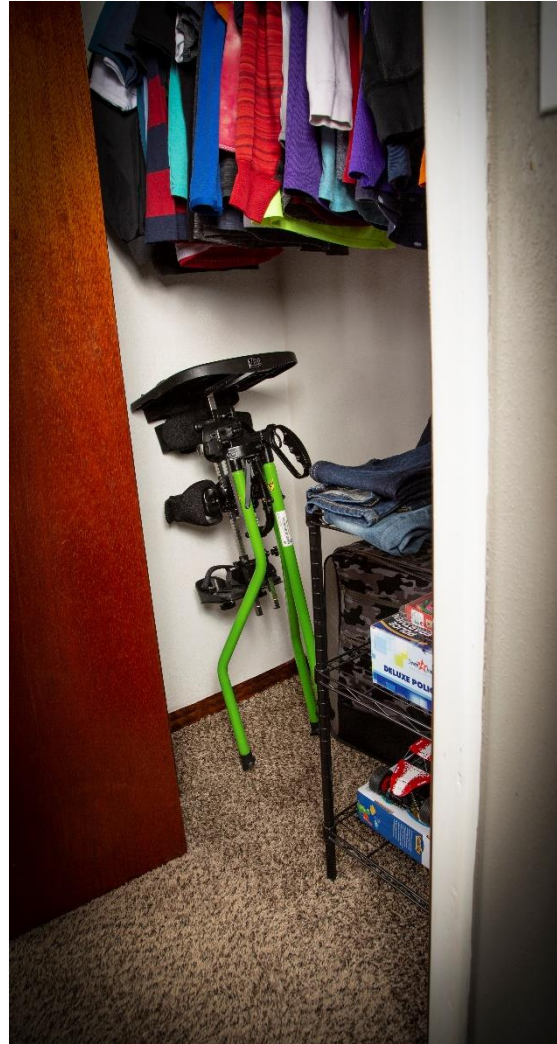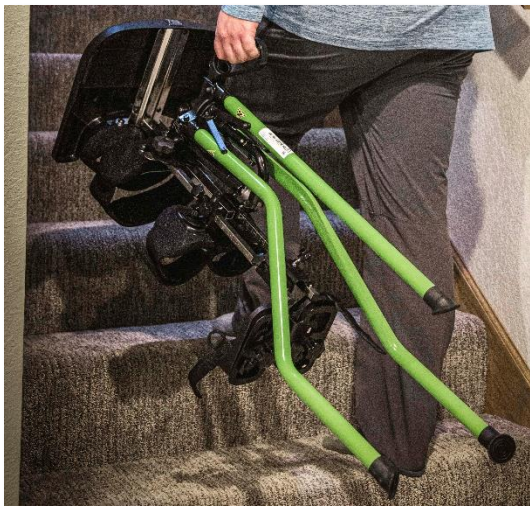


Le Zing Portatif est léger (9,75kg) et dispose de 3 pieds pliables comme un trépied traditionnel.

La poignée de transport ergonomique équilibre le poids de l'ensemble et facilite le déplacement du trépied d'un endroit à un autre

Le Zing Portatif est conçu pour se replier pour le rangement ou le voyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Plage de réglage en hauteur	Jusqu'à 91cm
Limite de poids	Jusqu'à 16,3kg
Poids de l'unité de base (sans tablette ni équerre de fixation)	6,4kg
Poids du mât pour la position dorsale avec tablette et appui-tête	2,5kg
Poids du mât pour la position ventrale avec tablette	1kg
Poids de l'unité avec toutes les options	9,7kg
Dimensions au sol	91x81cm
Hauteur de transfert (Horizontal au niveau du pivot de la hanche)	66cm
Abduction de la jambe	0 à 15°
Taille du repose pied	15x8cm
Plage de réglage en hauteur du pied (centre du support pelvien au repose pied)	22-44cm
Hauteur intérieure des supports genoux (la largeur est variable)	10cm
Réglage latéral des supports genoux (par côté)	3cm
Plage de réglage en hauteur des supports genoux (Centre du coussinet pelvien au centre du genou)	11-34 cm
Sangles de pied - longueur au-dessus de la voûte plantaire avec un chevauchement du Velcro de 2,5cm minimum.	21cm
Taille de la tablette thérapeutique moulé.	19 x 32 cm avec 8cm d'extension de coude
Tailles des coussins de soutien pour le bassin, le haut du corps et la tête	9x20

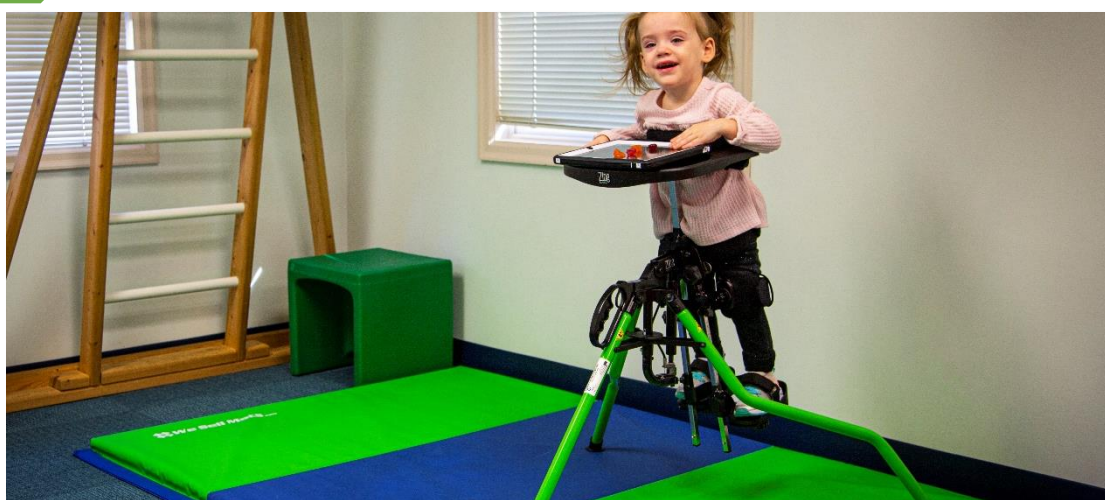



S'appuyant sur l'innovation et les caractéristiques de pointe du verticalisateur multi-positions Zing, le nouveau verticalisateur Zing Portatif est un bond en avant dans la conception du produit.

Ce nouvel appareil modulaire de verticalisation d'intervention précoce est le premier produit "à taille idéale" permettant de faire tenir debout des enfants aussi jeunes que possible. (Convient aux enfants de la petite enfance jusqu'à 91 cm et jusqu'à 16kg.)

Les enfants au développement normal commencent généralement à apprendre à se tenir debout entre 9 et 13 mois. Le Zing Portatif est conçu pour s'adapter à cette tranche d'âge mieux que tout autre produit disponible, mais ce n'est là qu'une des nombreuses caractéristiques qui définissent une nouvelle norme dans la prise en charge.

PORTATIF

LÉGER

PLIABLE