



Chaises douche percées de rééducation

Raz-CAT

Manuel d'utilisateur et de revendeur



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Le manque à se conformer peut provoquer une blessure ou des dommages !

Il est important que la chaise douche de rééducation Raz soit correctement assemblée et que tous les ajustages soient faits soigneusement. Veuillez-vous assurer que l'/les utilisateur(s), le/les revendeur(s) et le/les accompagnateur(s) ont lu ce manuel et ont totalement compris l'utilisation sûre de la chaise douche Raz. Des manuels à jours sont disponibles en ligne à www.razdesigninc.com. Pour des clarifications sur n'importe quelle section de ce manuel, contactez votre distributeur ou le fabricant.

France
Alleza Medical Sante
Rue Du CDI Charcot 56260
Larmor-Plage France
09 81 933 855
allezamedicalsante@bbox.fr

USA ET MONDE
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

CLASSIFICATION DE SIEGE SELON LE POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR

CAT

136 kg (300lbs)

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ POUR LES VENTES AU DÉTAIL

CET APPAREIL CONVIENT AU TYPE A; GRANDE UTILISATION (EX. INSTITUTIONS) ET NE DOIT JAMAIS ÊTRE UTILISÉ DANS UN AUTRE BUT QUE CELUI PRÉVU

Stabilité vers l'avant

Les roulettes de tous les modèles comportent des verrous doubles. Le levier à pédale active le verrou de roulement et le verrou de pivotement. ***Il est essentiel que toutes les roulettes de la chaise douche soient tournées vers l'extérieur avant de mettre les verrous pour une stabilité vers l'avant et latérale optimum.*** Si le verrou directionnel facultatif est présent, libérez-le avant de tourner la roulette arrière vers l'arrière et de mettre les verrous-doubles.

LES UTILISATEURS NE DOIVENT PAS se pencher vers l'avant en s'asseyant sur la chaise douche Raz car cela peut faire basculer la chaise vers l'avant.

LES UTILISATEURS NE DOIVENT descendre une rampe en roulant qu'avec un accompagnateur pouvant retenir le siège durant la descente.

LES VEROUS DE ROULETTE NE SONT PAS DES FREINS ! N'utilisez jamais les verrous de roulette pour ralentir la chaise douche en descendant des pentes car cela peut faire basculer la chaise dans le sens de son mouvement.



Stabilité latérale

LES UTILISATEURS NE DOIVENT PAS se pencher par-dessus le bord d'une chaise douche Raz car cela peut faire basculer la chaise.

LES UTILISATEURS NE DOIVENT PAS essayer de prendre des objets du sol en se penchant par-dessus pour les atteindre - une pince longue ou une aide par un accompagnateur doit être utilisée.



LES UTILISATEURS NE DOIVENT PAS positionner la chaise douche Raz sur une pente latérale car cela peut la faire basculer.

Rampes et autres inclinaisons

Les rampes et autres surfaces qui ne sont pas de niveau (comme les pentes des douches pour sièges roulants) doivent être essayées avec un accompagnateur pour s'assurer qu'elles ne compromettent la stabilité du siège. Un professionnel autorisé de soins de santé doit être consulté pour aider au processus.

NE poussez ou NE tirez PAS la Raz-CAT vers le haut ou le bas d'une rampe ou d'une inclinaison dont la pente est supérieure à 5 °.

NE laissez PAS un utilisateur être propulsé (poussé ou tiré) dans une chaise douche Raz-CAT d'une façon autre que par un accompagnateur.

VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LA CHAISE DOUCHE RAZ-CAT EST À TOUT MOMENT STABLE AVANT QU'ELLE NE SOIT OCCUPÉE PAR UN UTILISATEUR.

Immersion

La chaise douche Raz n'est pas conçue pour être utilisée comme chaise de piscine. N'immergez pas la chaise douche en totalité ou en partie dans de l'eau ou dans un autre liquide. Les composants de la chaise douche peuvent être endommagés.


Transferts

La partie la plus dangereuse de l'utilisation d'une chaise douche est le transfert. Comme chaque chaise a des caractéristiques différentes de stabilité, il est essentiel de passer en revue et d'essayer la technique de transfert pour assurer que la procédure est sûre. Des transferts d'essai doivent être effectués avec un accompagnateur pouvant empêcher le siège de basculer ou de bouger durant le transfert. Si vous pensez que les transferts ne peuvent pas être répétés en sécurité, contactez un professionnel de soins de santé familier avec les techniques de transfert et les options. Les personnes n'ayant pas appris les techniques sûres de transfert doivent rechercher une aide durant les transferts et peuvent avoir besoin d'un élévateur mécanique.

Transfert sur une chaise douche Raz-CAT

TOUJOURS verrouiller les quatre roulettes dirigées vers l'extérieur (roulettes avant vers l'avant/roulettes arrière vers l'arrière) pour une stabilité de chaise maximum.

Les transferts ne doivent jamais être tentés avec la chaise douche sur des surfaces glissantes. Il est recommandé d'effectuer les transferts sur des surfaces propres, sèches, non glissantes. Les revêtements de surface durs comme les carreaux, le bois ou le béton peuvent ne pas fournir une prise suffisante pour empêcher les roulettes et/ou roues arrière de glisser. Une surface entièrement tapissée est optimale. Sachez que les carpettes et les tapis de douche peuvent glisser sur les sols et constituent donc une surface dangereuse.

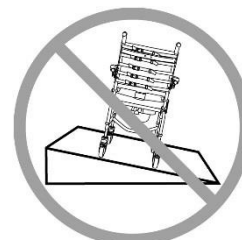


ROULETTES
MONTRÉES EN
POSITION VERS
L'EXTÉRIEUR



NE vous tenez **PAS** sur une partie quelconque du cadre de la chaise douche Raz-CAT.

N'utilisez JAMAIS les repose-pied pour aider aux transferts. Cela peut faire basculer le siège. Les repose-pied doivent être relevés sur le côté ou totalement retirés durant les transferts pour donner un accès sans obstacle au siège de douche.

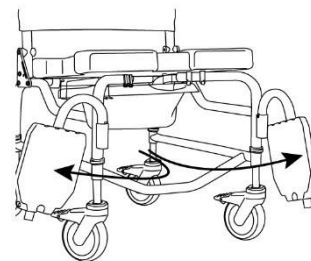

Fonctionnalité d'inclinaison

Vérifiez **TOUJOURS** la fonctionnalité d'inclinaison et assurez-vous que les assemblages des deux ressorts à gaz et câbles de libération sont totalement fonctionnels **AVANT** que la chaise ne soit occupée par l'utilisateur.

Une sangle pelvienne sert de sécurité supplémentaire pour l'utilisateur. Une sangle pelvienne de support peut être commandée en option avec la Raz-CAT.

N'essayez PAS d'incliner un occupant si l'accompagnateur est physiquement incapable d'opérer en sécurité et en douceur la fonctionnalité d'inclinaison.

NE laissez **JAMAIS** l'utilisateur sans surveillance dans une chaise douche Raz-CAT.

La chaise douche Raz-CAT **N'est PAS** prévue comme dispositif de transport ou comme un système pour s'asseoir longtemps.

IMPORTANT !

LES UTILISATEURS NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE LAISSÉS SANS SURVEILLANCE SUR UNE CHAISE DOUCHE RAZ.


IMPORTANT !

NE SOULEVEZ JAMAIS UNE CHAISE DOUCHE PERCÉE ET SON OCCUPANT PAR LES ACCOUDOIRS OU LES REPOSE-PIED !

IMPORTANT !

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA CHAISE EST CORRECTEMENT INSTALLÉE ET VERROUILLÉE. LE CROCHET ARRIÈRE DOIT ÊTRE TOTALEMENT ENGAGÉ ET LES SUPPORTS AVANT DOIVENT ÊTRE FERMÉS ET VERROUILLÉS AUTOUR DES TUBES AVANT DE SUPPORT DE LA CHAISE.

ASSUREZ-VOUS, QUAND LA CHAISE EST LIVRÉE AU CLIENT, QUE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SONT DONNÉES AU CLIENT ET/OU AUX SOIGNANTS.

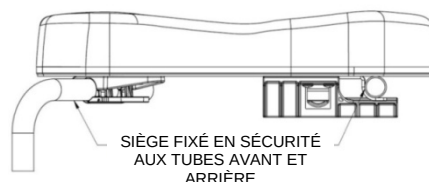


INDEX DU MANUEL D'UTILISATEUR ET DE REVENDEUR

1.0	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
1.1	Présentation des chaises douche Raz-CAT de rééducation	6
1.2	Spécifications des chaises douche Raz-CAT de rééducation	6
2.0	MONTAGE: À L'USAGE DES REVENDEURS UNIQUEMENT	
2.1	Mise en place des roulettes	7
2.2	Mise en place du dossier	7
2.3	Mise en place du siège Raz.....	8
2.4	Mise en place des repose-pied standards MFX8 et MFX12	8
2.5	Mise en place des fixations.....	8
3.0	AJUSTEMENTS : À L'USAGE DES REVENDEURS UNIQUEMENT	
3.1	Ajustement du dossier	9
3.1.1	Ajustement de l'angle du dossier.....	9
3.1.2	Ajustement de la profondeur du dossier	9
3.1.3	Ajustement de la tension de garniture de dossier à tension ajustable	9
3.2	Ajustement de siège CAT	10
3.2.1	Ajustement de la profondeur de siège CAT	10
3.2 . 3.2	Ajustement de la hauteur de siège CAT	10
3.3	Ajustement de l'appuie-tête moulé.....	11
3.4	Ajustement des accoudoirs.....	11
3.4.1	Ajustement de hauteur d'accoudoirs	11
3.4.2	Ajustement de l'angle des accoudoirs	11
3.5	Ajustement des repose-pied	
3.5.1	Ajustement des repose-pied standard et MFX12.....	12
3.5.2	Ajustement des repose-pied MFX8	12
4.	UTILISATION ET FONCTIONNEMENT	
4.1	Fonctionnalité d'inclinaison	13
4.2	Dossier multipositions.....	13
4.3	Garniture de dossier à tension réglable	14
4.4	Siège standard	14
4.5	Appuie-tête moulé	15
4.6	Repose-pied standard MFX12	15
4.7	Roulettes	16
4.8	Pédale d'assistance à l'inclinaison.....	16
4.9	Bassin de chaise percée.....	16
5.0	NETTOYAGE ET ENTRETIEN	
5.1	Nettoyage après chaque utilisation	17
5.1.1	Bassin de chaise percée	17
5.1.2	Siège moulé.....	17
5.2	Nettoyage comme nécessaire	17
5.2.1	Garniture de dossier à tension réglable.....	17
5.2.2	Cadre, Accoudoirs, Repose-pied réglables, et autres composants.....	17
5.3	Produits de nettoyage suggérés	17
6.0	GARANTIE LIMITÉE.....	18
7.0	CONTACTS	19

1.0 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Présentation des chaises douche de rééducation Raz-CAT

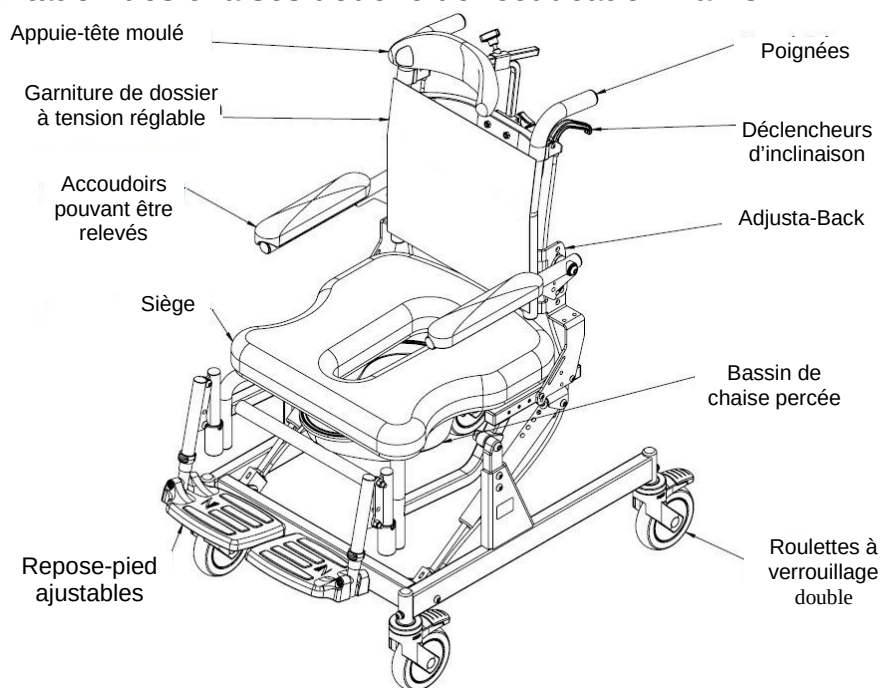

1.2 Spécifications des chaises douche de rééducation Raz-CAT

SPÉCIFICATIONS	Raz-CAT
CAPACITÉ EN POIDS	136 kg (300 lbs)
LARGEUR DE CADRE (cadre de siège)	46 cm (18")
LARGEURS DE CADRE DE DOSSIERS	35 cm, 40 cm , 46 cm (14",16", 18")
LARGEUR TOTALE	55 cm (21,75"), 58 cm (23") avec cadre de dossier de 46 cm (18")
LONGUEUR TOTALE (avec repose-pied)	81 cm (32")
LARGEUR DE SIÈGE (siège de chaise percée)	46 cm (18")
PROFONDEUR DE SIÈGE (de l'avant du montant arrière à l'avant du siège)	28-40 cm (11"-16")
HAUTEUR DE DÉGAGEMENT avec supports de bassin : sans supports de bassin :	42,5-53 cm (16,75"-20,75") 44,5-54,5 cm (17,5"-21,5")
HAUTEUR DES ACCOUDOIRS AU-DESSUS DU SIÈGE Dossier haut de 38 cm (15") : Dossier haut de 46cm (18") :	14-20 cm (5,5"-8") par pas de 1,2 cm (1/2") 16,5-23 cm (6,5"-9") par pas de 1,2 cm (1/2")
HAUTEUR SIÈGE-SOL	55-65 cm (21,5"-25,5") par pas de 2,5 cm (1")
POIDS DU PRODUIT (avec repose-pied)	25 kg (55 lbs)
MATÉRIAU DU CADRE ET DES COMPOSANTS MÉTALLIQUES	Acier inoxydable (Garantie à vie contre la corrosion)
CERCLE MINIMUM DE GIRATION	(97 cm)

2.0 MONTAGE : À L'USAGE DES REVENDEURS UNIQUEMENT

2.1 Mise en place des roulettes


Les chaises Raz-CAT sont expédiées avec les roulettes non-installées. Veuillez suivre les instructions avant la mise en place des roulettes.

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 6mm

1. Insérez la tige de roulette dans le logement de roulette sur le cadre de base.
2. Alignez le trou fileté de la tige de roulette avec le trou dans le logement de roulette.
3. Insérez une vis à tête hémisphérique M8-1,25x30 mm par la rondelle ressort M8 dans le trou du logement de roulette.

REMARQUE : Assurez-vous que chaque vis M8 a une solution de frein-filet sur ses filets avant d'utiliser.

4. Vissez la vis M8 par le logement de roulette dans la tige de roulette.
5. Continuez de visser la vis M8 jusqu'à ce que la rondelle ressort soit complètement plate et que la vis M8 soit serrée.
6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que les quatre roulettes soient fixées en place.

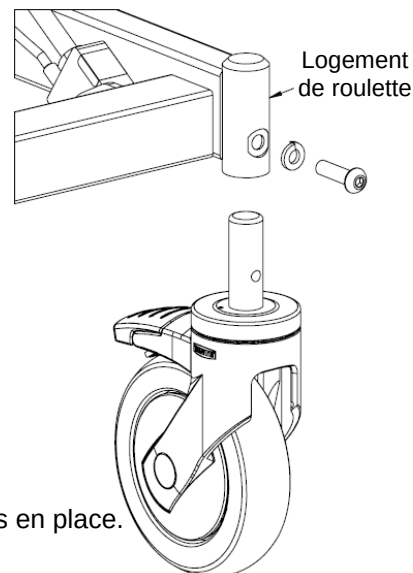

2.2 Mise en place du dossier


Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/32", clé de 7/16"

1. Retirez la chaise douche du carton d'expédition.
2. Mettez le dossier en position droite.
3. Insérez une vis incluse à tête hémisphérique à six pans creux de 1 3/2" de long par le trou arrière de la plaque de dossier et poussez-la à travers le tube de dossier.
4. Insérez l'autre vis à tête hémisphérique à six pans creux de 1 3/4" de long par le trou avant de la plaque de dossier et poussez-la à travers le tube de dossier.

REMARQUE : Choisissez le trou supérieur pour un angle de dossier de 90 ° ou le trou inférieur pour un angle de dossier de 95 °.


5. Fixez l'autre extrémité des vis avec une rondelle plate et un écrou nyloc comme montré ci-dessous.
6. Serrez l'assemblage.
7. Répétez les étapes 3 à 5 pour l'autre plaque de dossier.

REMARQUE : La profondeur du siège peut être ajustée de 28 cm (11") à 40 cm (16") selon la position de montage du dossier.

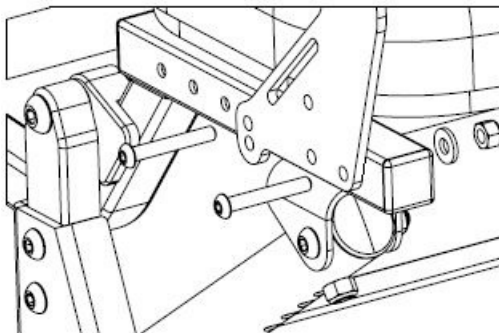


2.3 Mise en place du siège

1. Assurez-vous que les supports avant sont en position ouverte. Pour ouvrir les supports avant, forcez-les simplement en position ouverte.
2. Faites glisser l'arrière du siège par-dessus les tubes transversaux arrière quand l'avant du siège est abaissé sur le cadre. Vérifiez pour vous assurer que les supports arrière du siège sont accrochés sous les tubes transversaux.
3. Continuez à abaisser l'avant du siège jusqu'à ce que les supports avant du siège se logent sur les tubes de support avant du siège.
4. Fixez le siège en place en fermant les supports avant du siège. Pour fermer les supports de siège, ré-enclenchez la pince dans son autre moitié autour des tubes de support avant.
5. Exécutez à l'envers les étapes 1 à 4 pour retirer le siège du cadre.

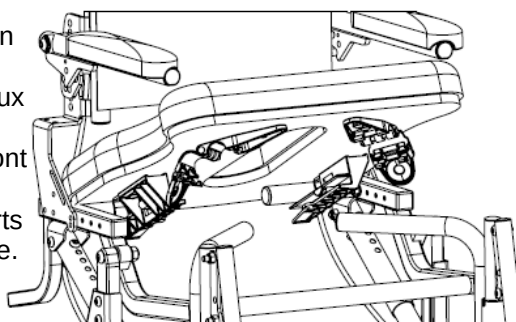


2.4 Mise en place des repose-pied standards, MFX8 et MFX12.

1. Retirez les repose-pied emballés de la boîte interne d'accessoires.
2. Placez les tubes de suspension de repose-pied dans les récepteurs soudés à l'avant du cadre de chaise. *Si les tubes de support sont dirigés vers l'avant, les goupilles des tubes s'engageront dans les rainures des récepteurs et se verrouilleront en place.*

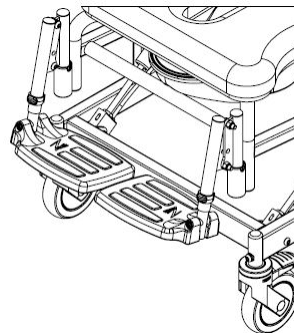

2.5 Mise en place des fixations

Toutes les fixations doivent être bien serrées. Les contre-écrous qui peuvent avoir été enlevés pour quelque raison que ce soit peuvent avoir à être remplacés plutôt que d'être réutilisés. Vérifiez le fonctionnement des écrous nyloc en les remettant sur les vis. Vous devez sentir une résistance importante lors du serrage. Sinon, remplacez l'écrou nyloc par un neuf. Il est conseillé de vérifier annuellement que toutes les fixations sont bien serrées.

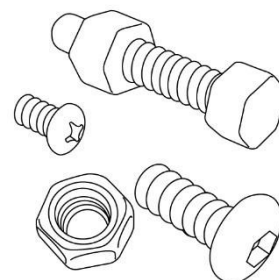

IMPORTANT !


L'AJUSTEMENT NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AVEC L'UTILISATEUR SUR LE SIÈGE.

3.1 Ajustement du dossier

3.1.1 Ajustement de l'angle du dossier

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/32", clé de 7/16"


1. Desserrez et retirez les contre-écrous et rondelles plates du côté intérieur des deux tubes verticaux de cadre de siège.
2. Retirez la vis avant de 1/4-20x1 1/2", du tube des ailettes de dossier des deux côtés.
3. Faites tourner le dossier dans l'une des 2 positions sur les ailettes.
REMARQUE : Choisissez le trou du haut pour un dossier à 90 °, le trou inférieur pour un angle de dossier de 97 °.
4. Avec le dossier en place insérez les vis par le trou choisi des ailettes de dossier et poussez-les à travers les tubes de cadre.
5. Fixez l'autre extrémité des vis avec une rondelle plate et un contre-écrou.
6. Serrez l'assemblage avec la clé hexagonale et la clé jusqu'à ce que l'extrémité de la vis dépasse l'écrou nyloc de 1 ou 2 filets.

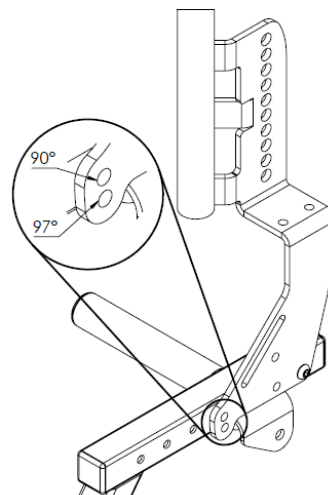

3.1.2 Ajustement de la profondeur du dossier

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/32", clé de 7/16"


1. Desserrez et retirez les contre-écrous et rondelles plates du côté intérieur des deux côtés du cadre de siège.
2. Retirez la vis avant de 1/4-20x1 3/4", des ailettes de dossier des deux côtés.
3. Repositionnez les trous des ailettes de dossier sur les trous de cadre de siège pour la profondeur de siège voulue.
4. Avec le dossier en place insérez les vis par les trous des ailettes de dossier et poussez-les à travers.
5. Fixez l'autre extrémité des vis avec une rondelle et un contre-écrou.
6. Serrez l'assemblage.

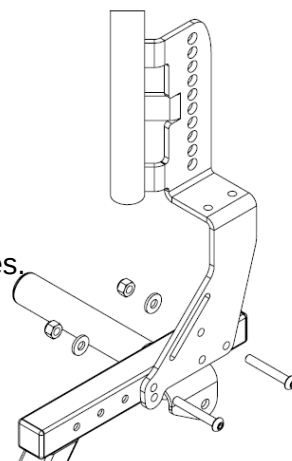

3.1.3 Ajustement de la tension de garniture de dossier à tension ajustable

Pour ajuster la garniture du dossier, chacune des sangles peut être tendue ou détendue dans les boucles afin d'offrir un grand nombre de positions.

Par exemple, la deuxième et la troisième sangle inférieures peuvent être resserrées afin d'offrir un support plus soutenu de la région lombaire.

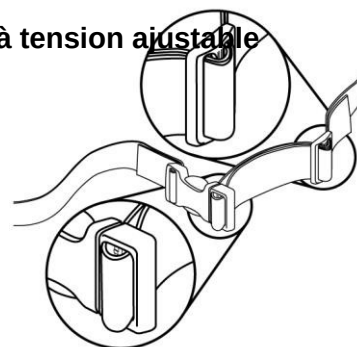


3.2 Ajustement de siège CAT

3.2.1 Ajustement de la profondeur de siège CAT

Le siège peut être ajusté d'environ 5 cm (2") vers l'avant/arrière.

Outils nécessaires : Tournevis Phillips n° 2

1. Libérez le siège en ouvrant les supports avant de siège en plastique.
2. Retirez le siège en levant son bord avant et en faisant glisser le siège vers l'avant, loin de la chaise.
3. Desserrez (*ne retirez pas*) les huit vis fixant les supports avant et arrière de siège sous le siège.
4. Remettez le siège sur son cadre en enclenchant les pinces avant de siège sur les tubes avant de support.
5. Faites glisser/bouger le siège en position voulue.
6. Serrez les vis juste assez pour tenir en place les supports avant de siège en vous assurant que le siège est placé directement sur le cadre.
7. Avec le siège sur la chaise, faites glisser en arrière les supports arrière jusqu'à ce qu'ils soient en contact ferme avec le tube transversal arrière, serrez les vis pour tenir les supports en place.
8. Retirez le siège (*étapes 1 et 2*) et serrez les huit vis.
9. Fixez le siège au cadre de chaise en suivant les étapes de mise en place de siège de la section 2.3

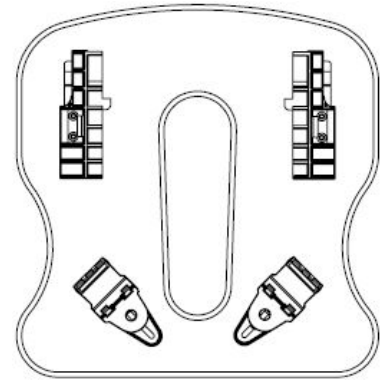


3.2.2 Ajustement de la hauteur de siège CAT

Pour modifier la hauteur siège-sol sur un Modèle Raz-CAT, le cadre de siège est monté ou descendu, par rapport à la base de roues, aux montants des deux côtés de la chaise.

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 6mm, clé de 13 mm

1. Enlevez les vis des montants gauche et droit de la chaise.
2. Enlevez les vis des deux tubes entretoises d'allongement par gaz sous le siège.
2. Montez ou abaissez la chaise à la hauteur nécessaire à l'utilisateur.
4. Ajustez le siège pour qu'il soit de niveau avec le sol.
5. Remettez les vis en place dans les montants de chaise et dans les ressorts à gaz de la chaise.

Remarque : La vis du tube entretoise d'allongement par gaz devra être déplacée de sa position précédente pour avoir un siège de niveau.

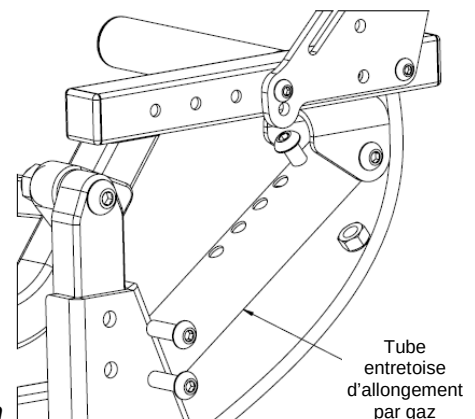


IMPORTANT !

AUGMENTER LA HAUTEUR DE SIÈGE ET L'ANGLE DE DOSSIER DIMINUERONT LA STABILITÉ VERS L'ARRIÈRE. IL EST INDISPENSABLE QU'UNE VÉRIFICATION DE STABILITÉ SOIT FAITE APRÈS L'UN DE CES AJUSTEMENTS.

3.3 Ajustement de l'appuie-tête moulé

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5/32"

1. Desserrez le bouton inférieur à trois lobes et ajustez la barre « col de cygne » verticale.
2. Desserrez le bouton supérieur à trois lobes et ajustez horizontalement le montant d'appuie-tête pour une modification de position avant/arrière.
3. Pour changer l'angle du coussinet d'appuie-tête, desserrez (sans les enlever) les trois vis au dos de l'appui-tête moulé. Faites tourner l'appui-tête autour de l'extrémité de la barre de montage de l'appui-tête comme commode à l'utilisateur et serrez les vis pour fixer.
3. Assurez-vous que tous les boutons et vis sont bien serrés pour la sécurité de l'utilisateur.

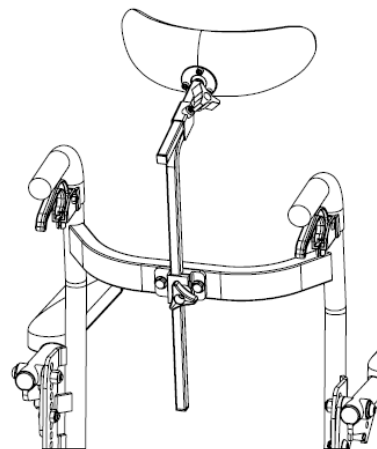


3.4 Ajustement des accoudoirs

3.4.1 Ajustement de hauteur d'accoudoirs

Les accoudoirs sont ajustables en hauteur sur 7,5 cm (3") par pas de 1,2 cm (1/2").

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 7/32", clé de 9/16"

1. Desserrez et enlevez le contre-écrou inférieur.
2. Desserrez et enlevez le contre-écrou supérieur.
3. En gardant l'assemblage accoudoir et plaque de pivot d'accoudoir ensemble, déplacez l'ensemble vers le haut ou le bas sur l'ensemble soudé de support d'accoudoir selon les besoins de l'utilisateur.
4. Remettez le contre-écrou de la vis supérieure.
5. Remettez le contre-écrou de la vis inférieure.
6. Serrez les vis et les contre-écrous en haut et en bas.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour l'autre accoudoir.

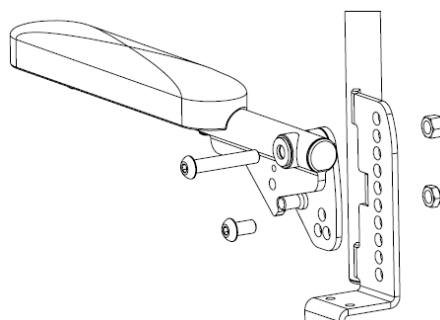


3.4.2 Ajustement de l'angle des accoudoirs

L'angle de l'accoudoir peut être ajusté sur 5° vers le haut ou le bas si l'angle de dossier est ajusté à la position d'usine de 90°.

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 7/32", clé de 9/16"


1. Desserrez et enlevez la vis, la rondelle et le contre-écrou au bas de la plaque de pivot de l'accoudoir.
2. En gardant la vis supérieure en place, faites tourner l'assemblage d'accoudoir jusqu'à la position voulue en alignant l'un des trois trous (disposés en triangle) de la plaque de pivot de l'accoudoir avec les trous sur l'ensemble soudé de support d'accoudoir.
3. Insérez la vis à la position voulue sur la plaque de pivot d'accoudoir et fixez le contre-écrou.
4. Serrez la vis et le contre-écrou.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour l'autre accoudoir.

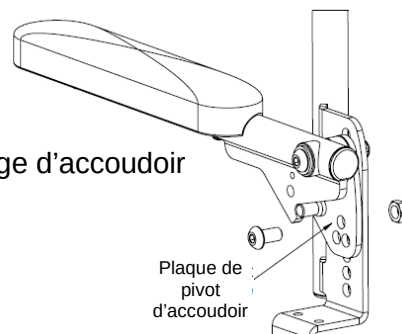

3.5 Ajustement des repose-pied

3.5.1 Ajustement des repose-pied standard et MFX12


1. Enlevez la goupille à retenue en plastique de l'un des tubes de suspension de repose-pied.
2. Ajustez verticalement le tube de rallonge de repose-pied pour obtenir la hauteur voulue dans le tube de suspension de repose-pied.
3. Insérez la goupille dans le tube de cadre et dans le tube de rallonge. Assurez-vous que la goupille est totalement insérée dans le tube et que la pince en plastique vert est bien enclenchée autour de l'extérieur du tube de suspension.
- 4 Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre repose-pied.

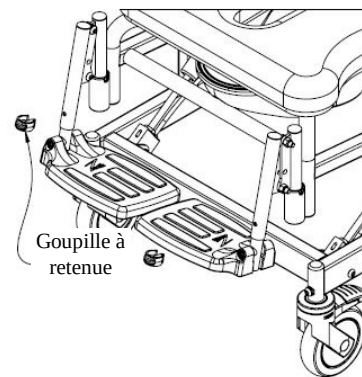

3.5.2 Ajustement des repose-pied MFX8

Outils nécessaires : Clé hexagonale de 5 mm

1. Enlevez la vis à six pans creux M6-1,0x55 mm de la plaque de repose-pied.
2. Déplacez la plaque de repose-pied à la hauteur appropriée avec le tube de suspension de repose-pied.
3. Remettez la vis et l'écrou nyloc, serrez.

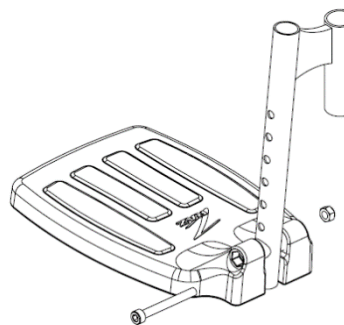


IMPORTANT !

L'AJUSTEMENT NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AVEC L'UTILISATEUR SUR LE SIÈGE.

4.1 Fonctionnalité d'inclinaison

La chaise douche percée Raz-CAT peut s'incliner jusqu'à 40 ° pour le confort et le soulagement de la pression de l'utilisateur. Deux entretoise ressort à gaz facilitent cette action et adoucissent l'inclinaison pour l'utilisateur et facilitent l'inclinaison pour l'accompagnateur. Pour incliner la chaise l'accompagnateur doit presser les deux déclencheurs d'inclinaison et mettre la chaise à l'angle voulu. Pour verrouiller la chaise en position les déclencheurs sont simplement relâchés. Immédiatement après l'achat les déclencheurs et les ressorts peuvent sembler durs. Cette dureté est normale et diminue avec l'usage. L'utilisation de la pédale d'assistance à l'inclinaison aidera à incliner le cadre de siège. La fonctionnalité d'inclinaison ne doit être utilisée qu'avec les roulettes verrouillées.

REMARQUE : Quand la chaise est montée à la hauteur minimum réglable, l'angle d'inclinaison maximum possible est de 40 ° Plus la hauteur est augmentée, moins la chaise est inclinable. (Avec une hauteur siège-sol de 25" la chaise peut être inclinée en arrière jusqu'à 36 °

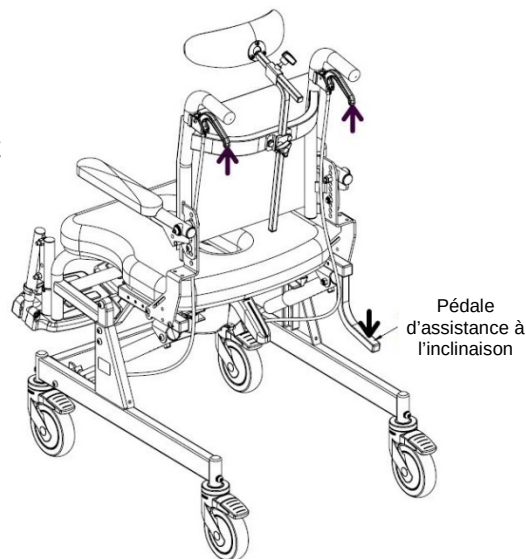


IMPORTANT !

N'ESSAYEZ PAS D'INCLINER UNE CHAISE DOUCHE RAZ SI L'ACCOMPAGNATEUR EST PHYSIQUEMENT INCAPABLE D'OPÉRER LE MÉCANISME D'INCLINAISON EN SÉCURITÉ ET EN DOUCEUR QUAND UN UTILISATEUR OCCUPE LA CHAISE. TOUT ACCOMPAGNATEUR DOIT ÊTRE FAMILIER AVEC LES TECHNIQUES CORRECTES D'INCLINAISON AVANT D'AIDER UN UTILISATEUR SUR LA CHAISE DOUCHE PERCÉE. UNE SANGLE PELVIENNE EST RECOMMANDÉE POUR TOUS LES UTILISATEURS COMME PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE DE SÉCURITÉ.

4.2 Dossier multipositions

L'angle d'inclinaison du dossier multipositions est ajustable (90 ° ou 97 °) et dispose d'accoudoirs à hauteur et angle réglables. L'accoudoir se verrouille automatiquement lorsqu'il est rabattu. Le dossier multipositions est disponible en largeurs de dossier de 43 cm, 50 cm ou 61 cm (14", 16" ou 18").

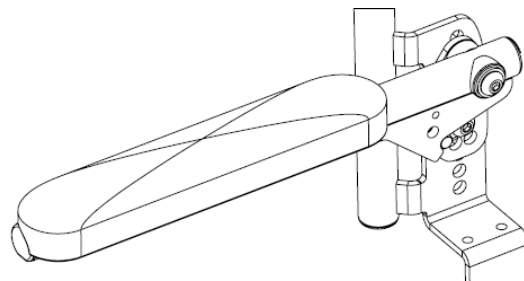


4.3 Garniture de dossier à tension réglable

Le dossier multipositions dispose d'une garniture de dossier à tension réglable qui fournit un soutien du torse pour un positionnement et un confort optimum. La garniture est amovible et lavable en machine et disponible en hauteurs de 43 cm, 50 cm ou 61 cm (14", 16" ou 18") en fonction de la hauteur du dossier sélectionné pour la chaise.


Pour installer la garniture de dossier à tension réglable sur Un dossier multipositions :

1. Positionnez le tissu sur l'avant des tubes du dossier en vous assurant que lorsqu'il recouvre le dossier, les attaches des sangles sont positionnées par-dessus le tissu et que les boucles sont orientées vers le bas.
2. La sangle la plus haute (1) est positionnée sur la barre transversale.
3. La deuxième sangle (2) et la troisième (3) sont positionnées entre la barre transversale et les plaques d'assemblage d'accoudoir.
4. La quatrième sangle (4) et la cinquième (5) sont raccordées aux ouvertures des plaques d'assemblage du dossier.
5. Le dossier de 50 cm (18") de haut est doté d'une sixième sangle qui est positionnée entre la barre transversale et les plaques d'assemblage d'accoudoir.
6. Réglez toutes les sangles pour ajuster le dossier en fonction des besoins de l'utilisateur.

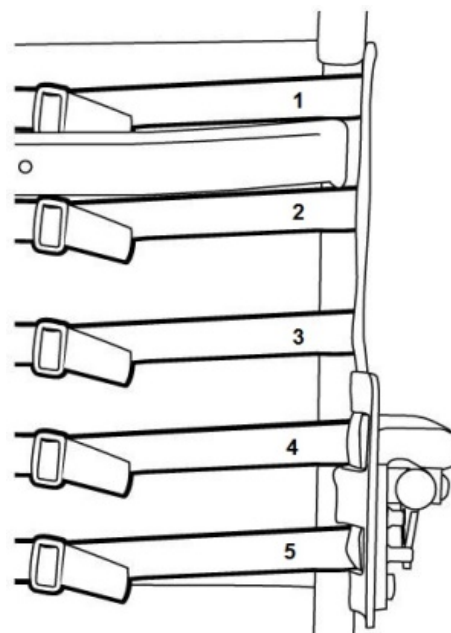

Pour ajuster le rembourrage arrière du dossier, chacune des sangles peut être resserrée ou desserrée afin d'offrir un grand nombre de positions. Par exemple, la deuxième et la troisième sangle inférieures peuvent être resserrées afin d'offrir un support plus soutenu de la région lombaire.


Pour retirer le rembourrage de dossier à tension réglable, desserrez les boucles des sangles.

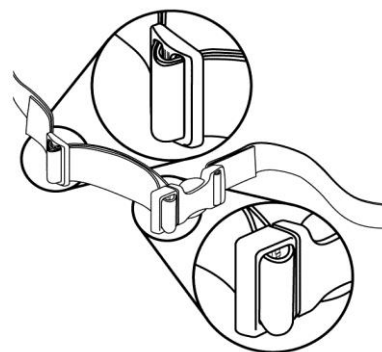

4.4 Siège standard


Le siège standard des chaises douches Raz-CAT est conçu avec une ouverture oblongue effilée convenant à des utilisateurs nécessitant une profondeur de siège de 28 cm à 40 cm (11" à 16"). Des sièges de forme plus commode sont aussi disponibles.

Toutes les chaises Raz s'adaptent sur la plupart des cuvettes de toilettes quand le bassin de chaise percée n'est pas en place.

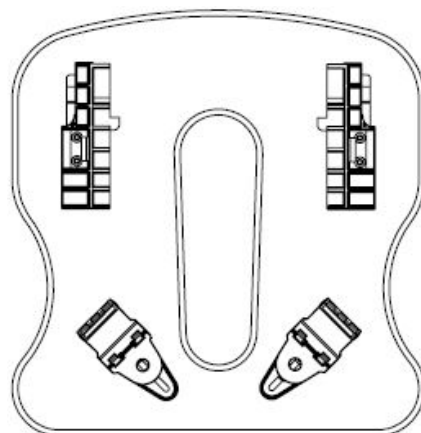

Pour installer un siège Raz :

1. Assurez-vous que les supports avant sont en position ouverte. Pour ouvrir les supports avant, forcez-les simplement en position ouverte.
2. Faites glisser l'arrière du siège par-dessus les tubes transversaux arrière quand l'avant du siège est abaissé sur le cadre. Vérifiez pour vous assurer que les supports arrière du siège sont accrochés sous les tubes transversaux.
3. Continuez à abaisser l'avant du siège jusqu'à ce que les supports avant du siège se logent sur les tubes de support avant du siège.
4. Fixez le siège en place en fermant les supports avant du siège. Pour fermer les supports de siège, ré enclenchez la pince dans son autre moitié autour des tubes de support avant.
5. Exécutez à l'envers les étapes 1 à 4 pour retirer le siège du cadre.

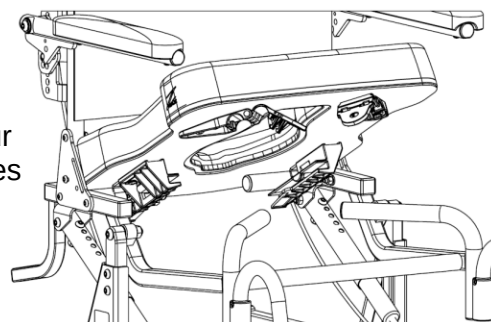

IMPORTANT !


N'ESSAYEZ JAMAIS DE MODIFIER LA HAUTEUR DU SIÈGE SANS L'AIDE D'UN REVENDEUR AUTORISÉ. DES POSITIONS DE SIÈGE PLUS HAUTES RÉDUIRONT LA STABILITÉ DU SIÈGE ET POURRONT LE FAIRE BASCULER ET CAUSER UNE BLESSURE.

4.5 Appuie-tête moulé

Un appuie-tête moulé est inclus avec toutes les chaises douche Raz-CAT. L'appuie-tête moulé a une forme pour recevoir confortablement la tête et est facile à nettoyer. L'appuie-tête moulé peut être ajusté en continu vers l'avant et l'arrière sur 12,5 cm (5") et verticalement sur 29 cm (11¹/₂").

Pour ajuster l'appuie-tête moulé :

1. Desserrez le bouton inférieur à trois lobes et ajustez la barre « col de cygne » verticale.
2. Desserrez le bouton supérieur à trois lobes et ajustez horizontalement l'appuie-tête pour une modification de position avant/arrière.
3. Pour changer l'angle du coussinet d'appuie-tête, desserrez (*sans les enlever*) les trois vis au dos de l'appui-tête moulé. Faites tourner l'appui-tête autour de l'extrémité de la barre de montage de l'appui-tête comme commode à l'utilisateur et serrez les vis pour fixer.
4. Assurez-vous que tous les boutons et vis sont bien serrés pour la sécurité de l'utilisateur.

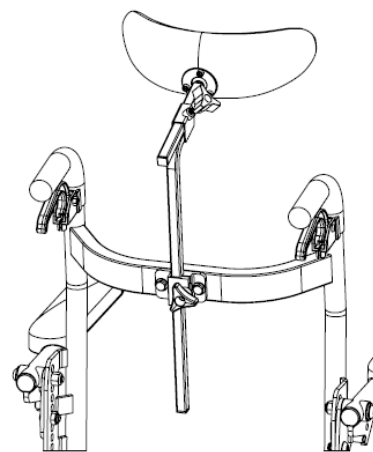

4.6 Repose-pied standard MFX12


Les repose-pied MFX12 sont standard sur toutes les chaises douche Raz-CAT. Pour les transferts, les repose-pied peuvent être relevés, tournés ou totalement enlevés. Pour les utilisateurs ayant des jambes longues, les repose-pied réglables MFX12 peuvent être rallongés à l'aide des tubes facultatifs de rallonge de repose-pied, tubes de 5 cm (2") de long pouvant être commandés pour n'importe quelle chaise douche Raz.

Pour insérer les repose-pied :

1. Mettez les tubes de suspension de repose-pied dans les récepteurs de repose-pied.
2. Si les tubes de suspension sont alignés vers l'avant, les goupilles des tubes s'engageront dans les rainures des récepteurs et se verrouilleront en place.

Pour ajuster la longueur des repose-pied :

1. Enlevez la goupille à retenue de l'un des tubes de suspension de repose-pied.
2. Mettez le repose-pied à la longueur convenant à l'utilisateur.
3. Insérez la goupille dans le tube de suspension de repose-pied et dans le tube intérieur.

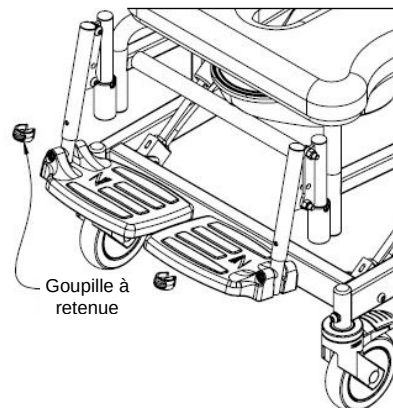


Pour tourner les repose-pied :

1. Soulevez le tube de suspension de repose-pied pour libérer les goupilles.
2. Faites tourner les repose-pied vers l'extérieur ou l'intérieur.

Pour enlever les repose-pied, soulevez les repose-pied hors des manchons récepteurs sur le cadre.

4.7 Roulettes

Chaque roulette de chaise douche Raz comporte un verrouillage double arrêtant simultanément la roulette de pivoter et de rouler. Pour activer le verrou double, poussez du pied l'extrémité du levier de frein de roulette jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position « on ». Pour désactiver le verrou double, poussez l'extrémité relevée du verrou double jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position « off ».

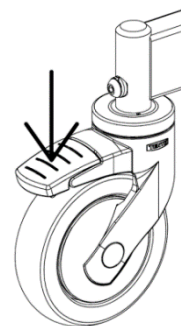


*Libérez **TOUJOURS** le verrou directionnel (si applicable) et faites pivoter les quatre roulettes en position vers l'extérieur pour une stabilité maximum avant de transférer ou d'incliner un utilisateur*

IMPORTANT !

TOUT ACCOMPAGNATEUR DOIT ÊTRE FAMILIER AVEC LES TECHNIQUES CORRECTES D'INCLINAISON AVANT D'AIDER UN UTILISATEUR SUR LA CHAISE DOUCHE PERCÉE. UNE SANGLE PELVIENNE EST RECOMMANDÉE POUR TOUS LES UTILISATEURS COMME PRÉCAUTION SUPPLÉMENTAIRE DE SÉCURITÉ.

4.8 Pédale d'assistance à l'inclinaison


Une pédale d'assistance à l'inclinaison est disponible sur la chaise douche Raz-AT pour faciliter l'inclinaison de la chaise par les accompagnateurs.

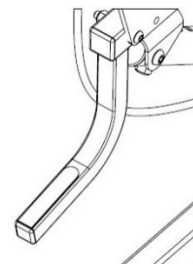

4.9 Bassin de chaise percée

Le bassin Raz de chaise percée est conçu de forme allongée s'adaptant directement sous le siège pour minimiser les éclaboussures en arrière. Un bombement unique de réduction d'éclaboussures est situé au centre du bassin. La surface au fini brillant facilite le nettoyage et le rinçage alors que le bec verseur et la poignée facilitent la vidange. Le bassin de chaise percée se fait en faisant glisser le bassin vers l'arrière.

REMARQUE : En réinsérant la bassin assurez-vous que le bassin est guidé par les supports en plastique vert et qu'il est poussé en avant jusqu'aux butées.

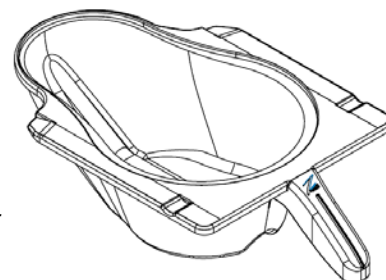

IMPORTANT !

UN REPRÉSENTANT RAZ AUTORISÉ DOIT ÊTRE CONTACTÉ AU MOINS UNE FOIS PAR AN POUR VÉRIFIER LES FIXATIONS, ROULETTES, VERROUS DE ROUE, COMPOSANTS MÉTALLIQUES ET TOUS LES AUTRES COMPOSANTS MOBILES

5.0 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

5.1 Nettoyage après chaque utilisation

5.1.1 Bassin de chaise percée

1. Retirez le bassin de chaise percée et videz le contenu.
2. Lavez le bassin avec une solution de nettoyant désinfectant tout usage. Utilisez une brosse douce si nécessaire.
3. Rincez bien avant stockage ou réutilisation.

REMARQUE : Un lavage à l'eau savonneuse chaude suivie par une pulvérisation avec une bombe de désinfectant peut remplacer la solution de nettoyant désinfectant tout usage.

5.1.2 Siège moulé

1. Pulvérisez un nettoyant désinfectant tout usage et frottez avec une brosse douce comme nécessaire.
2. Rincez avec une pulvérisation d'eau avant stockage ou réutilisation.
NE PLONGEZ PAS le siège dans de l'eau ou dans une solution de nettoyage.
3. Pour un nettoyage plus poussé, retirez le siège de la chaise douche pour avoir un meilleur accès au-dessous du siège et autour de l'ouverture du siège.

5.2 Nettoyage comme nécessaire

5.2.1 Garniture de dossier à tension réglable

1. Enlevez les boucles en plastique et les retenues de sangle des sangles de garniture de dossier en faisant attention, lors de l'enlèvement, à l'enroulement des sangles autour de chaque composant.
2. Enlevez la garniture de dossier du cadre arrière et lavez-la à la machine avec un détergent doux et de l'eau tiède en cycle normal ou en cycle doux. Incluez les autres types de sangle comme les H-straps, les sangles de positionnement de pelvis et de poitrine.
3. Remettez la garniture de dossier et les autres accessoires de positionnement sur la chaise et laissez sécher.

NE séchez **PAS** la garniture de dossier dans un sèche-linge, la garniture peut être endommagée.

4. Mettez toutes les boucles en plastiques et les retenues de sangle sur les sangles.
5. Ajustez les sangles pour la tension voulue.

5.2.2 Cadre, Accoudoirs, Repose-pied réglables, et autres composants

1. Pulvérisez le cadre et les composants avec un nettoyant désinfectant tout usage, frottez avec une brosse douce et rincez avec de l'eau.
2. Si nécessaire, pulvérisez le cadre et les composants avec une solution diluée (10 parties d'eau pour 1 partie de solution) de détartrant (comme CLR), frottez avec une brosse douce et rincez à fond avec de l'eau. **NE** mélangez **PAS** une solution de détartrant avec tout autre liquide, des vapeurs toxiques peuvent être produites.

Il est recommandé à l'utilisateur qu'un revendeur Raz autorisé vérifie toutes les fixations et sous-assemblages ou en cas de préoccupation sur le fonctionnement de la chaise.

La chaise douche et ses composants doivent être essuyés plusieurs fois par an avec une solution diluée de détartrant et rincés à l'eau chaude pour réduire les dépôts.

Pour réduire le risque d'apparition de moisissures toute la chaise douche doit être essuyée avec un tissu doux sec après le rinçage final et avant stockage ou utilisation.

5.3 Produits de nettoyage suggérés

Tâche	Produits recommandés
Nettoyage général	Détergent anti-bactéries
Nettoyant de surface contre les germes de la tuberculose Désinfectant de niveau intermédiaire	Oxiver TB (Virox Technologies Inc.) SepteFX 7D-11 (Titan Worldwide Inc.)
Produit réduisant l'accumulation de tartre	CLR

6.0 GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie n'est donnée qu'à l'acheteur/utilisateur d'origine d'une chaise douche Raz de rééducation achetée d'un revendeur Raz autorisé.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, mais vous avez des droits juridiques supplémentaires selon votre région ou votre pays.

Cette garantie doit être donnée pour se conformer aux lois et exigences d'état/de province.

Uniquement à l'acheteur/utilisateur d'origine, Raz Design garantit que ses composant de cadre de base et de dossier sont libre de défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat. Tous les autres composants de chaise douche Raz de rééducation sont couvert pour une période d'un (1) an, l'usure normale étant exclue. Si durant cette période de garantie un tel produit est prouvé défectueux, la pièce sera réparée ou remplacée, à la discrétion de Raz Design. Cette garantie ne comprend pas tous frais de main-d'œuvre et d'expédition subis pour le remplacement, montage de la pièce ou réparation d'un tel produit.

Pour un service sous garantie, veuillez contacter le revendeur à qui vous avez acheté votre chaise douche Raz de rééducation. Si vous n'êtes pas satisfait du service sous garantie, veuillez contacter directement Raz Design en utilisant les coordonnées se trouvant au début ou à la fin de ce manuel. Dans votre correspondance veuillez indiquer le nom de votre revendeur, son adresse, le type de produit, la date d'achat, le numéro de série de la chaise (sur une étiquette grise située sur le cadre de la chaise) ainsi que la nature du problème avec la chaise. Ne retournez pas le produit au fabricant sans autorisation préalable.

Limitations et exclusions

La garantie ci-dessus ne s'applique pas aux produits ayant un numéro de série enlevé ou dégradé, et aux produits soumis à une négligence ou à un accident. Une utilisation, un entretien ou un stockage incorrect peuvent annuler la garantie couvrant la chaise douche Raz de rééducation.

La garantie ne s'applique pas aux produits modifiés sans l'accord écrit exprès de Raz Design. Ceci comprend, sans y être limité, une modification en utilisant des pièces ou accessoires non autorisés, les produits endommagés par une réparation d'un composant quelconque par une/des personne(s) qui ne sont pas employées par un revendeur Raz autorisé, ou à des produits endommagés par des circonstances au-delà du contrôle de Raz. Seule Raz Design aura l'autorité de déterminer si les circonstances sont acceptables ou non pour l'applicabilité de la garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas aux problèmes survenant de l'usure normale ou du manque à suivre les instructions contenues dans ce manuel.

La garantie ci-dessus est exclusive et remplace toutes autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un but particulier. Le seul recours contre toute violation de toute garantie quelle qu'elle soit sera limité à la réparation ou au remplacement du produit défectueux en conformité avec les conditions contenues dans ce document.

L'application de toute garantie implicite ne s'applique pas au-delà de la durée de la garantie expresse donnée aux présentes. Raz Design ne sera pas responsable de tout dommage consécutifs ou indirects à une partie à toute la chaise douche Raz de rééducation.

IMPORTANT !

N'UTILISEZ PAS DE POUDRES DE NETTOYAGE ABRASIVES OU DE TAMPONS ABRASIFS SUR LA CHAISE DOUCHE RAZ.

NE PLONGEZ PAS LA CHAISE DOUCHE RAZ DANS DE L'EAU.

RINCEZ À FOND APRÈS UN NETTOYAGE POUR ÊTRE SÛR QUE TOUS LES RÉSIDUS DE SAVON OU DE DÉTERGENT SONT ENLEVÉS.

**N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT NETTOYANT SANS AVOIR CONSULTÉ LES INSTRUCTIONS DU PRODUIT
ET SANS AVOIR PRIS LES PRÉCAUTIONS APPROPRIÉES EN CE QUI CONCERNE L'EXPOSITION DES HUMAINS AUX PRODUITS CHIMIQUES.**

7.0 CONTACTS

Il est important que la chaise douche Raz de rééducation soit correctement assemblée et que tous les ajustages soient faits soigneusement. Des manuels à jour peuvent être téléchargés de www.razdesigninc.com. Pour des clarifications sur n'importe quelle section de ce manuel, contactez votre distributeur ou le fabricant.

France
Alleza Medical Sante
Rue Du CDI Charcot 56260
Larmor-Plage France
09 81 933 855
allezamedicalsante@bbox.fr

USA ET MONDE
Raz Design Inc.
22 Howden Rd. Toronto,
ON M1R 3E4
1.877.720.5678
info@razdesigninc.com

IMPORTANT !

LES PRODUITS QUI NE PEUVENT PLUS ÊTRE UTILISÉS DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉS SÉPARÉMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS. CECI DOIT ÊTRE FAIT SELON LES RÈGLEMENTATIONS LOCALES ET NATIONALES SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LE RECYCLAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES. VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB DE VOTRE GOUVERNEMENT LOCAL POUR D'AVANTAGE D'INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION CORRECTE.

SI VOUS PENSEZ À N'IMPORTE QUEL MOMENT QUE VOTRE CHAISE DOUCHE RAZ NÉCESSITE UN SERVICE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR. TOUT PROBLÈME POUVANT AFFECTER L'UTILISATION SURE DE LA CHAISE DOIT ÊTRE ABORDÉ IMMÉDIATEMENT. LE REVENDEUR AYANT FOURNI LA CHAISE DOUCHE DOIT ÊTRE CONTACTÉ POUR QUE LES RÉPARATIONS PUISSENT ÊTRE EFFECTUÉES AVANT D'UTILISER LA CHAISE. LE REVENDEUR DOIT SAVOIR CLAIREMENT QUE LA CHAISE DOUCHE A BESOIN DE SERVICE ET QU'ELLE NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉE AVANT QUE LES RÉPARATIONS NE SOIENT FAITES.

SI POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT LE REVENDEUR NE RÉPOND PAS À VOTRE SATISFACTION, VEUILLEZ CONTACTER RAZ DESIGN

PAR COURRIEL info@razdesigninc.com
PAR TÉLÉPHONE **1.877.720.5678**